

リチャージャーサポーター 取扱説明書

このたびは、リチャージャーサポーターをお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用前に取扱説明書をよくお読みいただき、十分にご理解のうえ正しい使用方法でお使いください。
なお、この取扱説明書はお読みになった後も、いつでも見られる場所に大切に保管してください。

1. 用途

DBS（脳深部刺激療法）用脳刺激装置のリチャージャーの固定

2. 使用上のご注意とお願い

〔 警告表示等の説明 〕



警告 : 生命に関わる怪我又は重傷を負う可能性が想定される内容を記載しています。



注意 : 傷害に至る可能性または物的損害が想定される内容を記載しています。



警告


- 本品の使用に際しては、必ず医師、看護師など医療従事者の指示に従ってください。
- 用途以外でのご使用はお止めください。
- 本品の加工、改造は行わないでください。
- サポーター本体をきつく締めすぎないでください。
- 長時間装着する場合は、適宜装着し直してください。
- 使用中に、痛み、しびれ、皮膚障害などの異常がありましたら、使用を中止し、医師に相談してください。
- 就寝時の使用については、必ず医師の指示に従ってください。



注意

- 本体生地が折れ曲がった状態で使用しないでください。
- 面ファスナーが衣類につかないように装着してください。衣類破損の原因になります。

3. 各部の名称

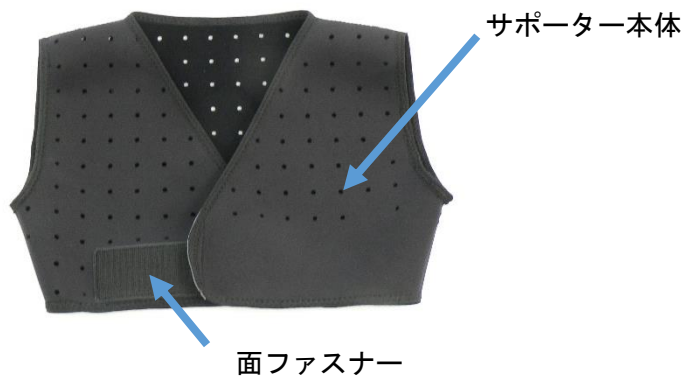


サポーター



付属品：アンテナ用面ファスナー（2枚）

4. 装着方法

《はじめに》 アンテナの上面に、付属の面ファスナー（2枚）を貼り付けてください。

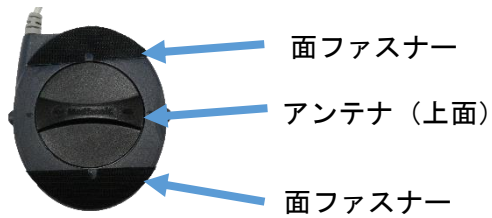


① 面ファスナーを取り外します。



② サポーター本体に腕を通して、胸部で面ファスナーをとめます。



③ リチャージャーをサポーター本体の内側に入れて、充電効率の良い位置を探してください。充電効率の良い位置が見つかりましたら、その位置で固定されるように、サポーター本体にアンテナの面ファスナーを貼り付けて固定します。位置の確認方法については、リチャージャーの取扱説明書をご確認ください。

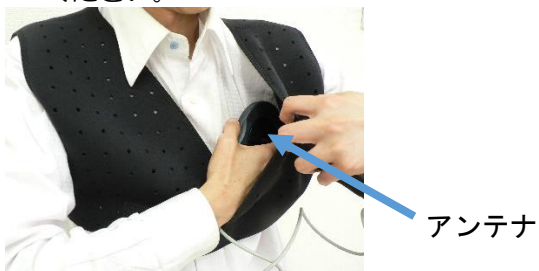

④ リチャージャーカバーの面ファスナーを、下の写真のように取り外してサポーター本体に貼り付けてください。



5. お手入れ方法

【洗濯方法】

- 面ファスナーを本体に貼り付けた状態で、水洗いしてください。
- 汚れがひどい場合は、水と中性洗剤を使用し、ていねいに押し洗いしてください。
- 他の衣類と一緒に洗濯することは避けてください。
- 洗濯後は、陰干ししてください。
- 漂白剤、洗濯機、アイロン、乾燥機の使用は避けてください。

【保管方法】

- 直射日光を避けて、湿気の少ない風通しの良い場所に、常温保管してください。
- 面ファスナーは、貼り付けた状態で保管してください。

【廃棄方法】

- 自治体の廃棄区分に従ってください。

6. 品質表示

本体生地 : クロロブレンゴム、ナイロン、ポリエステル
面ファスナー : ナイロン

7. サイズ表

サイズ	適用胸囲
S	61.5cm ～ 73.5cm
M	71.5cm ～ 83.5cm
L	81.5cm ～ 93.5cm

A/Z

Arizono Bespoke

株式会社有菌製作所

〒805-8538 福岡県北九州市八幡東区東田 1 丁目 7-5
TEL 093-661-1010 FAX 093-661-1670